
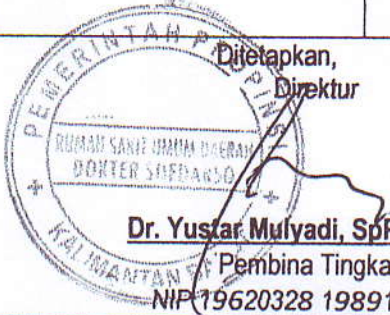


STERILISASI BERDASARKAN JENIS BARANG			
 RSUD Dr. SOEDARSO	No. Dokumen	No.Revisi	Halaman : 1/2
	010/065/22/AK-RSDS		
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit	 Ditetapkan, Direktur Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP.19620328 198910 1 001	
PENGETIAN	Proses sterilisasi berdasarkan jenis barang yang akan disterilkan.		
TUJUAN	1. Bahan yang disterilkan tidak rusak 2. Proses sterilisasi lebih efektif		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Melakukan pemilahan alat/instrumen yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Macam linen, kasa, instrumen stainless steel, korentang Botol WSD, sarung tangan, selang vacuum/section Kaca mulut BMP set, dan alat – alat dari bahan plastik dan karet. 2. Melakukan sterilisasi : <ol style="list-style-type: none"> Macam linen, kasa, instrumen stainless steel, korentang. Alat tersebut disterilkan dengan cara teknik panas/uap panas dengan tekanan tinggi 134°C memakai autoclave dalam waktu 45 menit Botol WSD, sarung tangan. Alat tersebut disterilkan dengan teknik panas/uap panas dengan tekanan tinggi 120°C memakai autoclave dalam waktu 45 menit Alat – alat seperti kaca mulut dan kaca disterilkan menggunakan panas kering (oven panas atau mesin listrik suhu 170°C dalam waktu 1 jam) Alat – alat seperti instrumen BMP set dan alat – alat dari bahan plastik dan karet seperti slang o2, slang inhalasi, slang suction, polycateter disterilkan dengan menggunakan sisa panas steam dalam satu malam. 		
UNIT TERKAIT	1. Semua ruangan jasa CSSD 2. IPFRS		