
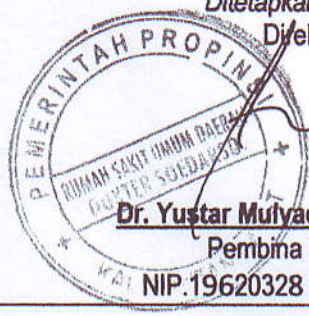


PROSEDUR PENCUCIAN ALAT/SET DARI RUANGAN			
 RSUD Dr. SOEDARSO	No. Dokumen	No.Revisi	Halaman : 1/2
	010/065/34/AK-RSDS		
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit	Ditetapkan, Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP.19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Untuk membersihkan instrumen setelah dipakai		
TUJUAN	1. Untuk menghilangkan kotoran yang terlihat dan yang tak terlihat 2. Untuk menghilangkan mikroorganisme berbahaya 3. Untuk menghilangkan efektifitas dari proses sterilisasi dan desinfeksi		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Petugas pencucian cuci tangan sebelum bekerja 2. Petugas pencucian menggunakan peralatan kerja (masker, sarung tangan, topi, sepatu boot, celemek, dan kaca mata) 3. Petugas pencucian menyiapkan larutan disinfektan <ol style="list-style-type: none"> a. Alkazyne <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapkan 1 liter air kedalam wadah ▪ Masukkan 1 sachet alkazyne ke dalam 1 liter air ▪ Tunggu sampai sachet terdispersi / larut dengan air ▪ Tambahkan air sampai batas 5 liter kedalam wadah pencucian ▪ Masukkan alat medis yang akan dicuci. Pastikan alat tenggelam semua kedalam air ▪ Pastikan semua instrumen bedah dalam keadaan terbuka, rendam instrumen selama 15 menit ▪ Angkat alat medis dan instrumen bedah yang sudah dicuci, kemudian bilas dengan air yang mengalir 		