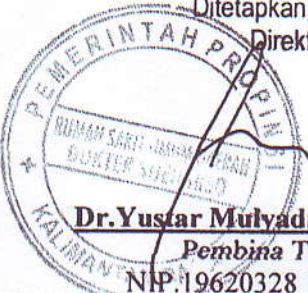
 RSUD Dr. SOEDARSO	PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN SILING GUNDUS SALDATRIA		
	No. Dokumen <i>010/045/17/PAK-RSDS</i>	No.Revisi	Halaman : 1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit <i>20 Oktober 2015</i>	Ditetapkan, Direktur  Dr.Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH <i>Pembina Tingkat I</i> NIP.19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Tatacara pengoperasian mesin siling gundus saldatria		
TUJUAN	Memudahkan penggunaan mesin siling gundus saldatria		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersihkan body mesin siling secara keseluruhan sebelum digunakan terlebih dahulu 2. Hidupkan mesin siling dengan mencolokan kebel ke panel listrik 3. Tekan on pada tombol mesin siling yang berada disamping mesin warna hijau 4. Setelah mesin siling hidup tekan tombol temperatur mesin siling yang berada diatas mesin dengan temperatur 180 5. Setelah itu masukan ujung pouches kedalam mulut mesin siling dan biarkan pouches berjalan sendiri atau pegang bagian ujung lainnya. 6. Setelah selesai matikan mesin siling dengan menekan tombol of bagian samping mesin berwarna hijau 		
UNIT TERKAIT	Petugas CSSD		