
 RSUD Dr. SOEDARSO	MEMONITOR MUTU STERILISASI INSTRUMEN, LINEN DAN BAHAN		
	No. Dokumen	No.Revisi	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Oktober 2015	Ditetapkan Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan yang berhubungan dengan tatacara mekanisme memonitoring mutu sterilisasi		
TUJUAN	Untuk menjamin bahwa mesin autoclave yang dipergunakan untuk proses sterilisasi dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil sterilisasinya.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	Secara Mikro : <ol style="list-style-type: none"> 1. Test yang dilakukan secara rutin setiap hari di CSSD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Bowie dick test dilakukan setiap hari satu kali setiap mesin sebelum memulai mensterilkan instrumen dan bahan b. Indikator internal 4, 5, 6 dilakukan setiap hari kedalam setiap satuan instrumen dan linen yang disterilkan c. Autoclave tape dilakukan pada setiap bundel barang dan alat (instrumen dan linen) yang akan disterilkan. 2. Hasil sterilisasi (indikator Internal) setiap hari dikim/ dikembalikan oleh setiap unit yang menggunakan pelayanan CSSD (terutama OK) 3. Hasil tersebut di simpan perhari dan di analisis/ evaluasi tanda keseterilannya. 		
UNIT KERJA	Ruangan Pengguna pelayanan/ OK PPI		