



# PROSEDUR OPERASIONAL STEAM STERILIZER VS 4/2 - STEELCO

RSUD DOKTER SOEDARSO

No. Dokumen :  
19/065/03/AK-RSDS/2017

Revisi : 0

Hal : 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :  
06-11-2017

Ditetapkan  
Direktur,  
  
**Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Tatacara penggunaan mesin steam sterilizer VS 4/2 - Steelco

TUJUAN

Untuk mengetahui dan melaksanakan penggunaan mesin steam sterilizer VS 4/2 - Steelco agar sesuai standar.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral.

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Nyalakan mesin dengan menekan tombol power, layar panel kontrol akan menampilkan menu utama.
2. Buka pintu chamber dengan menekan tombol "Open".
3. Cek kondisi chamber, pastikan chamber bersih dan tidak ada cacat pada dinding chamber.
4. Masukkan peralatan yang akan disterilkan ke dalam chamber dengan bantuan loading cart & trolley.
5. Tutup pintu chamber dengan menekan tombol "Close".
6. Tekan tombol "Sterilization", lalu tekan tombol "Operator" dan masukkan password.
7. Pilih program yang akan dijalankan dengan menekan tombol "Working program"
8. Setelah program sterilisasi dipilih, tekan tombol "Confirm" lalu tekan tombol "Start" dan proses sterilisasi akan berjalan sesuai program yang telah dipilih.
9. Saat seluruh proses sterilisasi selesai, printer akan mencetak hasil proses sterilisasi.
10. Pada sisi belakang, buka pintu mesin dengan menekan tombol "Open" lalu keluarkan peralatan yang telah disterilkan kemudian tutup pintu mesin dengan menekan tombol "Close".
11. Bila ingin melanjutkan penggunaan mesin, ulangi prosedur dari tahap 2.
12. Bila ingin menghentikan penggunaan mesin tekan tombol "Power" untuk mematikan mesin.

UNIT TERKAIT

- Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS)