



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

OPERASIONAL OKSIGEN REGULATOR

No. Dokumen
12/056/040/AK
-RSUD/2017

No. Revisi
02


Halaman
1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

2/11-2017

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso

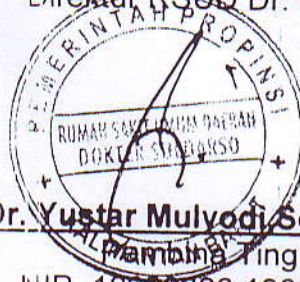

Dr. Yustar Mulyadi SoPD(K)GEH
Pambina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Unsur yang diperlukan untuk menunjang Pelayanan kepada pasien yang memerlukan di Rumah Sakit.

TUJUAN

1. Agar petugas dapat mengetahui dan mengoperasikan gas medis serta peralatan penunjangnya sehingga mendapat hasil yang maksimal.
2. Sebagai petunjuk dalam mengetahui dan menangani gas medis yang ada di Rumah Sakit.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soedarso Nomor 264 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Posisikan tabung gas medis (jika menggunakan trolley) dekat dengan pasien yang membutuhkan.
2. Perhatikan jarum indikator meteran tekanan tabung.
3. Isi air bersih pada wadah regulator.
4. Putar knob regulator kekiri/kanan, untuk mengatur tekanan oksigen yang keluar.
5. Perhatikan meteran regulator dan gelembung air pada wadah.
6. Pasang masker Oksigen ke Pasien

UNIT TERKAIT

1. Petugas IPFRS.
2. Petugas Ruangan Rawat Inap