
 RSUD DOKTER SOEDARSO	PROSEDUR OPERASIONAL CUTTER/PISAU PEMOTONG INDIKATOR PACK/POUCHES (MODEL: RT-800) HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) LOW TEMPERATURE PLASMA STERILIZER CASP-300D		
	No. Dokumen : 19/065/05/AK-RSWS/2017	Revisi : 0	Hal : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 06-11-2017	Ditetapkan Direktur,  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Tatacara penggunaan Cutter/Pisau Pemotong indikator Pack/Pouches (Model: RT-800) H2O2 Low Temperature Plasma Sterilizer CASP-300D		
TUJUAN	Untuk mengetahui dan melaksanakan pemotongan indikator pack/pouches CASP H2O2 Low Temperature Plasma Sterilizer CASP-300D agar sesuai standar.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral.		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan indikator pack/pouches ketempat dudukan. 2. Arahkan ujung indikator pack/pouches kearah pisau pemotong hingga ujung keluar indikator pack/pouches melebihi batas besi potong. 3. Tarik indikator pack/pouches sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 4. Geser dan tekan besi potong dari kanan kekiri atau sebaliknya agar indikator pack/pouches terpotong. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS)		