
 RSUD Dr. SOEDARSO	PROSEDUR PENGONTROLAN AUTOCLAVE DENGAN BOWIE DICK		
	No. Dokumen 010/065/30/AK-RSDS	No.Revisi	Halaman : 1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 20 Oktober 2015	 Ditetapkan, Direktur Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP.19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Suatu pengontrolan fungsi Autoclave dipastikan berfungsi baik dengan menggunakan indikator Bowie Dick test		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk efisiensi pompa vacum pada mesin Autoclave dan untuk mengetahui adanya kebocoran udara dalam chamber mesin Autoclave pada saat proses sterilisasi 2. Pengontrolan fungsi Autoclave dilakukan setiap hari dan mesin dalam keadaan baik 		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas CSSD, membuka kran (air, steam, angin) dan menaikkan handel listrik untuk memanaskan mesin Autoclave 2. Petugas CSSD memasukkan Bowie Dick test Pack kedalam chamber mesin Autoclave 3. Petugas CSSD menutup pintu mesin dengan menekan tombol Door, dan memilih program Bowie Dick Test 4. Setelah suhu tercapai petugas mengoperasikan mesin, menekan Strat, mesin berjalan secara otomatis. 5. Setelah mesin selesai petugas mengeluarkan Bowie Dik Test dari dalam chamber Autoclave 6. Setelah dinyatakan baik petugas menginformasikan kepada petugas Penanggung Jawab bahwa mesin dapat dioperasikan kembali 7. Petugas CSSD melaporkan kebagian IPFRS apabila terjadi kerusakan atau tidak kestabilan dalam jalannya mesin 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPFRS 2. ISPJ 3. Ruang Perawatan 4. Poli 		