



RSUD Dr. Soedarso

PENANGANAN SAMPEL DARAH

No Dokumen 16/065/08/AK-RSDS/2018	No Revisi -	Halaman 1/1
--------------------------------------	----------------	----------------

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Ditetapkan
Direktur
RSUD Dr. Soedarso

Tanggal Terbit
2 Januari 2018

Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001



PENGERTIAN	: Penanganan contoh darah adalah prosedur penyiapan contoh darah dari ruangan sampai contoh darah disiapkan di Unit Bank Darah untuk diperiksa
TUJUAN	: Untuk mendapatkan darah donor yang sesuai dengan darah pasien dan pengecekan cek ulang bila sewaktu-waktu diperlukan.
KEBIJAKAN	: Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso no 274 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Darah
PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan spuit/vacutainer terlebih dahulu sebelum pengambilan contoh darah. Spuit/vacutainer diberi identitas pasien (nama, no MR, dan tanggal) 2. Pada saat akan mengambil darah disamping pasien, cek ulang antara pasien dan identitas yang tertulis di spuit 3. Contoh darah beserta formulir permintaan darah di kirim ke Unit Bank Darah. 4. Petugas loket penerimaan contoh darah di Unit Bank Darah menerima contoh darah. 5. Ditanyakan kembali pada pembawa contoh darah, apakah contoh darah yang di bawa adalah milik pasien yang di maksud. 6. Petugas mencocokkan data pada contoh darah dengan formulir permintaan darah. 7. Contoh darah diletakkan di rak tabung pada loket laboratorium unit bank darah beserta formulir permintaan darah. 8. Contoh darah diproses untuk pemeriksaan golongan darah dan uji silang serasi. 9. Contoh darah yg telah di proses disatukan dengan potongan selang kantong darah donor yang sesuai lalu di disimpan di refrigerator khusus penyimpanan darah selama 7 x 24 jam.
UNIT TERKAIT	Semua Ruang perawatan medis