



RSUD DOKTER SOEDARSO

**PROSEDUR OPERASIONAL SEALER PACK/POUCHES
(MODEL: PS- 200) HYDROGEN PEROXIDE (H₂O₂) LOW
TEMPERATURE PLASMA STERILIZER CASP-300D**

No. Dokumen :

19/065/02/AK-ASes/2017

Revisi : 0

Hal : 1/1

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

6/11/2017

Ditetapkan
Direktur,

Dr. Yusuf Mulyadi, SpPD(K)GEH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Tatacara penggunaan Sealer Pack/Pouches (Model: PS-200) H₂O₂ Low Temperature Plasma Sterilizer CASP-300D

TUJUAN

Untuk mengetahui dan melaksanakan penggunaan Sealer pack/pouches CASP H₂O₂ Low Temperature Plasma Sterilizer CASP-300D agar sesuai standar.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral.

PROSEDUR
PELAKSANAAN

1. Masukkan/colokan kabel power supply 220 V (single fase) ke sumber listrik.
2. Hidupkan power supply tombol on pada alat.
3. Tunggu pemanasan sealer sampai suhu $\pm 135^{\circ}\text{C}$.
4. Setelah suhu tercapai masukkan indikator pack ke sensor sealer sampai berbunyi klik.
5. Setelah berbunyi klik roller pada sealer bekerja dan bias masukkan indikator pack kedalam sela-sela sealer dan pegang indikator pack selama dalam pengepresan indikator pack.

UNIT TERKAIT

Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS)