



RSUD DOKTER SOEDARSO

**PROSEDUR OPERASIONAL WASHER DISINFECTOR  
DS 610/2 - STEELCO**

No. Dokumen :  
19/065/04/AK-RSDS/2017

Revisi : 0

Hal : 1/1

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :  
06-11-2017

Diretapkan  
Direktur,

  
**Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Tatacara penggunaan mesin washer disinfector DS 610/2 - Steelco

TUJUAN

Untuk mengetahui dan melaksanakan penggunaan mesin washer disinfector DS 610/2 - Steelco agar sesuai standar.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral.

PROSEDUR  
PELAKSANAAN

1. Nyalakan mesin dengan cara memutar tombol kearah "On.
2. Buka pintu chamber dengan menarik handle kearah luar.
3. Cek kondisi chamber, pastikan chamber bersih dan tidak ada cacat pada dinding chamber.
4. Masukkan peralatan yang akan diproses ke dalam chamber dengan bantuan loading cart.
5. Tutup pintu chamber dengan cara mendorong handle ke arah dalam.
6. Pilih program yang akan dijalankan dengan menekan tombol "P1" atau "P2" atau "P3" atau dengan menekan tombol "P+" pada panel kontrol.
7. Tekan tombol "Start" dan proses pencucian dan pendisinfeksi akan berjalan sesuai program yang telah dipilih.
8. Saat seluruh tahapan proses telah selesai, pada sisi belakang, buka pintu mesin dengan cara menarik handle kearah luar lalu keluarkan peralatan yang telah selesai diproses kemudian tutup pintu mesin dengan cara mendorong handle ke arah dalam.
9. Bila ingin melanjutkan penggunaan mesin, ulangi prosedur dari tahap 2.
10. Bila ingin menghentikan penggunaan mesin putar tombol kearah "Off" untuk mematikan mesin.

UNIT TERKAIT

- Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS)