



**PROSEDUR TETAP
PEWARNAAN DIFF QUICK**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :

**PROSEDUR
TETAP**

Tanggal terbit :

Ditetapkan
Direktur,

† dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH[†]
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Suatu metode pewarnaan dengan metode *Diff Quick*

TUJUAN

Mewarnai sediaan hapusan supaya bisa dibedakan inti dan sitoplasmanya.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 229 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

PROSEDUR

A. TATA LAKSANA

PERSIAPAN

1. Mengganti cat minimal 1 minggu sekali.
2. Mengisi ulang cat : metanol, eosin, methylen blue.
3. Menyediakan objek glass yang dipakai untuk hapusan.
4. Menyediakan hair dryer sebagai alat pengering.

PROSEDUR

1. Buat hapusan segera dan keringkan dengan hair dryer.
2. Celupkan slide sebanyak 5x masing-masing selama 1 detik kedalam bahan fiksasi, setiap selesai mencelup bahan fiksasi ditiriskan.
3. Celupkan slide selama 5x masing-masing selama 1 detik kedalam cat eosin, tiriskan kelebihan cat setiap selesai mencelup.
4. Celupkan cat selama 5x masing-masing 1 detik kedalam cat methylin blue, tiriskan setiap selesai mencelup.
5. Bilas slide dengan air mengalir.
6. Biarkan slide mengering di udara terbuka beberapa saat.
7. Tutup slide dengan cover glass menggunakan entelan.

B. ALAT DAN BAHAN

- Pinset
- Hair dryer
- Cover glass
- Objek glass
- Entelan
- Sticker label
- Sarung tangan disposibel

	<ul style="list-style-type: none">• Cat Diff Kwick (Metanol, Eosin, Methylin Blue). C. TENAGA <ul style="list-style-type: none">• Tenaga Analis Patologi Anatomi
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi