



RSUD Dr. Soedarso

PENGOPERASIAN ALAT ID-CENTRIFUGE 12 S II

No Dokumen 16/065/ /AK-RSDS/2018	No Revisi -	Halaman 1/1
-------------------------------------	----------------	----------------

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
2 Mai 2018

Ditetapkan
Direktur
RSUD Dr. Soedarso

Dr. Yustar Mulyadi SpPD(K)GEH
Pembina Tingkat I
NIP : 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

: ID Cenrtifuge 12 S II adalah alat yang digunakan untuk mengetahui hasil akhir pada pembacaan crossmatch

TUJUAN

: Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk ID Cenrtifuge 12 S II sesuai protap yang berlaku.

KEBIJAKAN

: Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso no 274 tahun 2018 Tentang Pelayanan Darah.

PROSEDUR

1. Tempatkan alat pada tempat yang datar dengan posisi yang benar
2. Pastikan kabel listrik terpasang dengan benar
3. Tutup pintu dengan rapat
4. Nyalakan alat dengan kunci pada posisi ON pada bagian belakang alat.
5. Tunggu beberapa saat ,jika alat dalam posisi terbuka maka akan muncul tulisan OPEN LID,pada display.
6. Masukkan liss combs dengan posisi saling berhadapan ,jika memutar satu liss combs gunakanimbangan
7. Tutup cover sampai terkunci, maka akan muncul tulisan READY pada display,tekan tombol START
8. Tunggu sampai alat berhenti secara otomatis dan cover akan terbuka.
9. Untuk menghentikan mendadak tekan tombol STOP

UNIT TERKAIT

: Petugas BDRS