
	PROSEDUR TETAP PENGEBLOKAN JARINGAN (TISSUE EMBEDDING)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit :	-	Ditetapkan Direktur,  dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH^R Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001
PENGERTIAN	Proses memasukkan jaringan ke dalam paraffin cair untuk dibuat blok yang padat.		
TUJUAN	Agar spesimen mudah disayat dengan Mikrotome dalam ukuran ketebalan 2-10 mikron.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 229 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
PROSEDUR	D. TATA LAKSANA <ul style="list-style-type: none"> • Siapkan base mould pada suhu 60 °C • Siapkan kaset pada suhu 60 °C • Dengan menekan kran paraffin tank, masukkan paraffin ke dalam base mould sampai volume nya cukup. • Masukkan spesimen ke dasar base mould dengan menggunakan pinset. • Letakkan kaset diatas base mould yang udah diisi spesimen/jaringan. • Letakkan base mould yang sudah terisi pada cold plate. • Tunggu 2 sampai 4 menit. • Lepaskan kaset dari base mould. • Blok paraffin siap dipotong atau disayat. E. ALAT DAN BAHAN <ul style="list-style-type: none"> • Tissue Embedding Center • Cold Plate • Base mould • Tissue Embedding Kaset • Histoplas (paraffin) F. TENAGA <ul style="list-style-type: none"> • Tekhnisi spesialis Patologi Anatomi 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi		