

 <b>RSUD Dr. SOEDARSO</b>	<b>PEMELIHARAAN ULTRASONOGRAPH ( USG )</b>		
	No. Dokumen 17/1065/038/AK- RSDS/2018	No. Revisi	Halaman : 1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit :  06 Agustus 2018	Ditetapkan oleh Direktur RSUD Dokter Soedarso  <b><u>Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K) GEH</u></b> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 1988910 1 001	
<b>PENGERTIAN</b>	Prosedur Tetap (Protap) pemeliharaan adalah prasyarat dan urutan kerja yang harus dipenuhi dan dilakukan, agar pemeliharaan suatu alat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar pemeliharaan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.</li> <li>2. Alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.</li> </ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	Pedoman Operasional Alat Kesehatan Dep.Kes RI, Dirjen Yanmed, Instalasi Medik 2002		
<b>PERALATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tool set mekanik.</li> <li>2. Multimeter digital.</li> <li>3. Multimeter Analog</li> </ol>		
<b>PRASYARAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM, teknisi terlatih</li> <li>2. Peralatan kerja.</li> <li>3. Dokumen teknis penyerta.</li> <li>4. Bahan pemeliharaan dan Material bantu tersedia</li> <li>5. Mekanisme kerja jelas</li> </ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Persiapan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapkan perintah kerja</li> <li>2. Siapkan formulir laporan kerja</li> <li>3. Siapkan dokumen teknis penyerta :</li> <li>4. Service manual</li> <li>5. Siapkan Bahan pemeliharaan, Bahan Operasional dan Material bantu :</li> </ol> </li> </ol>		





RSUD Dr. SOEDARSO

## PEMELIHARAAN ULTRASONOGRAPH ( USG )

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :

1/2

### PROSEDUR

6. Contact cleaner
7. Kain Lap halus dan kapas
8. Lampu indicator
9. Pemberitahuan kepada user

#### 2. Pelaksanaan

1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat tiap 3 bulan
2. Cek tombol – tombol, joystick / track ball tiap 1 bulan
3. Cek probe, monitor, bersihkan bila perlu tiap 1 bulan
4. Cek printer / kamera Polaroid dan shutter camera Polaroid tiap 1 bulan
5. Cek sensitifitas dan brightness dalam bentuk tampilan dengan menggunakan probe, adjustment bila perlu tiap 3 bulan
6. Lakukan pengukuran arus bocor tiap 1 tahun
7. Lakukan pengukuran tahanan kabel pembumian alat tiap 1 tahun
8. Lakukan uji kinerja alat tiap 6 bulan

#### 3. Pencatatan

1. Isi Kartu Pemeliharaan alat
2. Isi Formulir Laporan Kerja
3. User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan Kembali kepada user

#### 4. Pengemasan alat kerja dan dokumen teknis penyerta

1. Cek alat kerja dan sesuaikan dengan catatan
2. Cek dan rapihkan dokumen teknis penyerta
3. Kembalikan alat kerja dan dokumen teknis penyerta ke tempat semula

#### 5. Pelaporan

Laporkan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas

PETUGAS

Teknisi Elektromedik RSUD Dokter Soedarso

UNIT TERKAIT

1. IPFRS
2. Logistik
3. Instalasi Farmasi.
4. Pengguna Alat
5. Rekanan ( Pihak III)
- 5 Kepala Ruangan / Unit