



RSUD Dr. SOEDARSO

OPERASIONAL OKSIGEN TROLI

No. Dokumen

17/065/041/
AK-RSDS / 2018

No. Revisi

Halaman

1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

06 Agustus 2018

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso

Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH

Pembina Utama Muda
Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Oksigen Trolis adalah unsur yang diperlukan untuk menunjang pelayanan gas medis kepada pasien yang memerlukan di Rumah Sakit, yang didistribusikan secara mobile/bergerak dengan menggunakan tabung oksigen dan kereta dorong (trolis).

TUJUAN

1. Agar petugas dapat mengetahui dan mengoperasikan gas medis serta peralatan penunjangnya sehingga mendapat hasil yang maksimal.
2. Sebagai petunjuk dalam mengetahui dan menangani gas medis yang ada di Rumah Sakit.

KEBIJAKAN

1. Pedoman Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik tentang Instalasi Gas Medis Rumah Sakit Tahun 1994
2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang tugas dan fungsi IPFRS.

PERALATAN

Toolset (Kunci Pas / Inggris)

PROSEDUR

A. Cek (buka / tutup) stop kran tabung oksigen (O₂)

1. Ganti, jika meter regulator sudah menunjuk angka nol (pada garis merah).
2. Kembalikan kepada petugas ruangan, Jika meter regulator menunjuk angka pada garis kuning atau lebih dan pelampung (indikator) penggunaan O₂ dapat diatur.

B. Cara mengganti tabung oksigen (O₂) manual

1. Turunkan tabung oksigen dari trolinya.
2. Tutup stopkran pada tabung oksigen.
3. Buka regulator dengan kunci pas / spana seperlunya, lanjutkan buka dengan tangan.
4. Siapkan tabung oksigen berisi, buka segelnya.
5. Pastikan semua ulir bersih, pasang / ulirkan menggunakan tangan hingga maksimal, kuatkan dengan kunci pas / spana seperlunya.
6. Pastikan stopkran regulator tertutup, buka stopkran tabung perlahan-lahan.
7. Cek fungsi oksigen dengan membuka / menutup stopkran regulator.
 - a. Pelampung (indikator) oksigen bisa diatur.
 - Baik, serahkan ke petugas ruangan
 - b. Pelampung (indikator) oksigen tidak bisa diatur
1. Kemungkinan filter sumbat
 - diganti kalau ada (sampai sekarang belum pernah ada pengganti)
 - lepaskan filter
2. Kemungkinan ada kebocoran pada accories regulator
 - Perbaiki yang bocor

UNIT TERKAIT

1. Petugas Ruangan keperawatan
2. Kasi. Penunjang Non Medis
3. Sub Bid. Renja
4. Panitia Pengadaan
5. Supplier/pihak ke III