


PROSEDUR PENCUCIAN ALAT/SET DARI RUANGAN			
 RSUD Dr. SOEDARSO	No. Dokumen	No.Revisi	Halaman : 2/2
	PROSEDUR PELAKSANAAN	010/065/34/AK-RSD	
UNIT TERKAIT	b. Alkacide <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekan botol Alkacide sampai terisi 20 ml larutan pada tutup takaran, lalu tuangkan kedalam 1 liter air Contoh : 40 ml untuk 2 liter atau 5X20 ml untuk 5 liter ▪ Tuangkan kedalam wadah perendaman sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Masukkan alat yang sudah dilakukan pre-cleaning ▪ Usahakan instrumen tenggelam sempurna didalam larutan dan rendam selama kurang lebih 15 menit atau waktu yang direkomendasikan ▪ Setelah proses perendaman, bilas instrumen dengan air ▪ Keringkan instrumen yang telah dilakukan proses perendaman oleh alkacide 4. Rendam instrumen dalam cairan desinfektan sesuai petunjuk bahan yang digunakan 5. Selesai direndam dalam cairan desinfektan, bersihkan instrumen dengan cara disikat satu persatu menggunakan sikat instrumen 6. Instrumen tersebut dibilas dengan air mengalir 7. Menyerahkan kepetugas pengeringan		
	1. Ruang perawatan 2. Ruang Rawat Jalan 3. PPI 4. Instalasi Farmasi 5. ISPJ		