

 RSUD Dr. SOEDARSO	OPERASIONAL FREEZER KAMAR JENAZAH		
	No. Dokumen <i>445 / 6273 / RDS / PMS / 2019</i>	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR	Tanggal terbit : <i>26 - 09 - 2019</i>	Ditetapkan  Direktur RSUD Dr. Soedarso  <u>drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
PENGERTIAN	Freezer Jenazah adalah alat pendingin untuk menyimpan dan menjaga kondisi tubuh jenazah agar tetap awet pada suhu dan waktu tertentu		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar operasional dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan benar. 2. Alat selalu dalam keadaan siap pakai sehingga umur teknis alat menjadi lebih panjang. 3. Menjaga mutu pelayanan pemulasaran jenazah tetap optimal. 4. Membantu pihak Kepolisian yang melakukan autopsy terhadap jenazah. 		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Panduan Pelayanan Unit Kerja Pemulasaraan Jenazah Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah		
PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 2. Sarung Tangan Khusus (Disposable) 		
PROSEDUR	I. Proses MENYALAKAN ALAT <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungkan Steker ke Stop Kontak PLN 220 V/ 50 Hz. b. Tekan tombol Power ke posisi ON. c. Tekan tombol ON (warna kuning) keposisi ON. II. Proses MEMATIKAN ALAT <ol style="list-style-type: none"> a. Tekan tombol OFF keposisi OFF. b. Tekan tombol Power ke posisi OFF. c. Cabut steker dari stop kontak PLN. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IPNMS yang ditunjuk. 2. Pihak Kepolisian 3. Yayasan / Dinas Sosial 		