

 RSUD Dr. SOEDARSO	PENYIMPANAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH (PENYIMPANAN TROMBOSIT PEKAT)		
	No Dokumen 16/065/16 /AK- RSDS/2018	No Revisi -	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Mei 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso <u>Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH</u> Pembina Tingkat I NIP.: 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	:	Prosedur ini merupakan pedoman bagi petugas Unit Bank Darah dalam melakukan proses penyimpanan darah dan komponen darah sesuai dengan persyaratannya.	
TUJUAN	:	Menghindari terjadinya kerusakan pada platelet concentrate, mempertahankan kanviabilitas dan fungsi trombosit sekaligus upaya efisiensi dan optimalisasi pemampatan platelet incubator.	
KEBIJAKAN	:	Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso no. 274 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Darah	
PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa suhu platelet incubator 2. Cek komponen darah trombosit pekat yang diterima dari parmuhusada 3. Simpan komponen darah tersebut dalam platelet incubator di atas rak yang bergoyang 4. Letakkan tong trombosit di atas rak platelet incubator satu persatu (tidak di tumpuk) dengan posisi tidur 5. Letakan kantong trombosit dengan label menghadap keatas 6. Susun trombosit pada platelet incubator menurut kelompok golongan darah. 7. Beritanda pada rak sesuai golongan darah tersebut diatas 8. Isi dengan lengkap buku stok trombosit 9. Buka platelet incubator hanya bila diperlukan 10. Beri nomor platelet incubator bila jumlahnya lebih dari satu 11. Monitor suhu platelet incubator 12. Catat suhu platelet incubator pada formulir pencatatan suhu setiap pergantian dinas (pagi, siang dan malam) 	
UNIT TERKAIT	:	Semua ruang perawatan medis	