
 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	Pemeriksaan Differential Count		
	No. Dokumen 065/ 2011 /RSDS/LAB/2018	No. Revisi 05	Halaman 1 / 3
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2018	 Ditetapkan, Direktur RSUD Dokter Soedarso Dr. YUSTAR MULYADI, SpPD(K) GEH / Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198901 001	
Pengertian	Pemeriksaan Differential Count (Diff-Count) adalah penghitungan persentase sel-sel normal dari sel darah putih (leukosit) terdiri dari sel eosinofil, basofil, stab, segmen, limfosit dan monosit yang dilihat menggunakan mikroskop.		
Tujuan	Untuk mengetahui persentase dari sel eosinofil, basofil, stab, segmen, limfosit dan monosit.		
Kebijakan	I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso. II. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.		
Prosedur	A. Alat yang Dipergunakan <ul style="list-style-type: none"> - Kaca objek kering dan bersih - Mikropipet dan tips - Kertas tissue - Mikroskop B. Bahan yang Dipergunakan <ul style="list-style-type: none"> - Darah EDTA - Pewarna GIEMSA stock - Larutan Penyangga / Aquabidest C. Cara Kerja <ol style="list-style-type: none"> a) Membuat Sediaan Apus <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaca obyek yang dipakai harus yang kering, bebas debu dan bebas lemak. Untuk menggeserkan darah pada kaca obyek tersebut digunakan kaca obyek lain yang sisi pendeknya rata sekali. 		