

 <p>RSUD Dr. Soedarso</p>	PENGOPERASIAN ALAT BLOOD BANK REFRIGERATOR DOMETIC MP 295		
	No Dokumen 16/065/ /AK-RSDS/2018	No Revisi -	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Mai 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso <u>Dr. Yustar Mulyadi SpPD(K)GEH</u> Pembina Tingkat I NIP : 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	: Blood Bank Refrigerator Dometik MP 295 adalah alat yang digunakan untuk menyimpan stok darah.		
TUJUAN	: Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Blood Bank Refrigerator Dometik MP 295 sesuai protap yang berlaku.		
KEBIJAKAN	: Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso no 27 tahun 2018 tentang Pelayanan Darah.		
PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempatkan alat pada tempat yang datar dengan posisi yang benar 2. Pastikan kabel listrik terpasang dengan benar 3. Tutup pintu dengan rapat 4. Nyalakan alat dengan kunci pada posisi ON/1 pada bagian Atas 6. Alat sudah disetting dari perusahaan dengan suhu 2-4 c 5. Operator tidak memerlukan setting 6. Tunggu beberapa saat sampai suhu mencapai suhu 2-4 c setelah suhu stabil alat siap digunakan 7. Masukkan darah dengan rapi sesuai golongan, jangan sampai menyentuh dinding alat 8. Tutup kembali dengan rapat pintu Blood Bank setelah dibuka 9. Jangan membuka Blood Bank jika tidak benar benar memerlukan 10. Untuk mematikan alarm tekan tombol Alarm 		
UNIT TERKAIT	: Petugas BDRS		