


 RSUD Dr. SOEDARSO	PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN STEAM STERILISASI STERIS AMSCO CENTURY 04604		
	No. Dokumen <i>610/065/23/RSK-RSDS</i>	No.Revisi	Halaman : 1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit <i>20 oktober 2015</i>	Ditetapkan, Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP.19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Tatacara teknik penggunaan pengoperasian mesin steam sterilisasi		
TUJUAN	Memudahkan penggunaan mesin steam sterilisasi		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeceng kesediaan air di bak air 2. Hidupkan pompa air 3. Memberi tahu IPFRS untuk meminta steam 4. Buka kran pembuangan steam 5. Tutup kran steam pembuangan 6. Buka kran steam masuk kedalam mesin 7. Menghidupkan mesin sterilisasi tekan tombol on 8. Yakinkan semuanya hidup 9. Melakukan pemanasan mesin/one up selama 20 menit 10. Sambil menunggu pemanasan mesin petugas menyusun barang-barang yang akan disterilkan kedalam troli penyeterilan 11. Melakukan uji klinis mesin / bowei dick test selama 20 menit 12. Masukan troli pensterilan kedalam mesin steril 13. Tutup pintu mesin steril/dikunci 14. Lakukan pensterilan dengan menekan tombol on pada layar 15. Lalu tekan menu prepack 		

 RSUD Dr. SOEDARSO	PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN STEAM STERILISASI STERIS AMSCO CENTURY 04604		
	No. Dokumen <i>010/065/23/AK-RSDS</i>	No.Revisi	Halaman : 1/2
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 16. Proses pensterilan selama 40 menit 17. Setelah selesai pesterilan buka pintu 18. Keluarkan troli dari dalam mesin dan menyimpan bahan yang telah steril kedalam ruang penyimpanan steril 19. Setelah itu tutup pintu mesin steril 20. Tutup kran steam masuk 21. Buka steam pembuangan 22. Tekan tombol of 23. Tutup kran air masuk 24. Matikan panel of 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. IFPRS 2. Seluruh ruangan pengguna jasa CSSD 3. Petugas CSSD 4. ISPJ 		