

 <p>Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso</p>	Gambaran Darah Tepi		
	<p>No. Dokumen 065/2014/RSUDS/LAB/2018</p>	<p>No. Revisi 05</p>	<p>Halam: 1 / 2</p>
<p>Standar Prosedur Operasional (SPO)</p>	<p>Tanggal Terbit 01 Agustus 2018</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan, Direktur RSUD Dokter Soedarso</p> <p style="text-align: center;">Dr. YUSTAR MULYADI, SpPD(K) GEH/ Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198901 001</p>	
<p>Pengertian</p>	<p>Gambaran Darah Tepi adalah pemeriksaan sel-sel darah tepi secara mikroskopis untuk melihat bentuk dan jenis sel-sel darah</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>Untuk membantu diagnosa penyakit kelainan eritrosit, leukosit dan trombosit.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<p>I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.</p> <p>I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.</p>		
<p>Prosedur</p>	<p>B. Alat yang Dipergunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaca objek kering dan bersih - Mikropipet dan tips - Kertas tissue - Mikroskop - Kapas alkohol - Lanset <p>C. Bahan yang Dipergunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darah EDTA - Pewarna GIEMSA stock - Larutan Penyangga / Aquabidest <p>D. Cara Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien dalam posisi duduk atau berbaring. - Bersihkan kulit pada daerah yang akan ditusuk memakai kapas alkohol, tunggu kering. - Ambil darah dari ujung jari dengan menggunakan lanset steril. 		