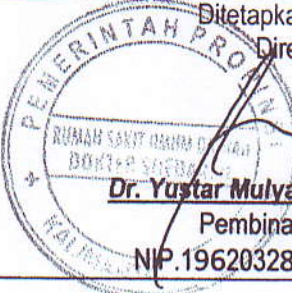
 RSUD Dr. SOEDARSO	PROSES STERILISASI		
	No. Dokumen <i>010/065/21/AK-RSDS</i>	No.Revisi	Halaman : 1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit <i>20 Oktober 2015</i>	Ditetapkan, Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP.19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Suatu sistem yang dimulai dari penerimaan alat –alat, pemilahan alat, desinfeksi alat dengan alkohol, pencucian, packing, alat siap disteril dan penyimpanan alat steril.		
TUJUAN	1. Mensterilkan alat –alat instrumen 2. Alat – alat instrumen siap pakai		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Alat – alat /instrumen dari ruangan dipilah sesuai jenisnya. 2. Instrumen non infeksi direndam dalam bak rendaman dengan desinfektan alkacide perbandingan 4 takaran dengan 1 liter air kemudian dicuci secara manual, dipacking, sterilisasi dan disimpan dilemari CSSD 3. Instrumen infeksi direndam dalam bak rendaman dengan desinfektan alkacide perbandingan 4 takaran dengan 1 liter air selama 15 menit, kemudian dicuci dan dikeringkan secara manual kemudian instrumen dipacking, sterilisasi dan disimpan dilemari CSSD 4. Alat plastik/ karet direndam dengan desinfektan, dicuci, dikeringkan, packing, sterilisasi dan kemudian disimpan dilemari dan trolly CSSD. 5. Linen bersih dari laundry dilakukan pelipatan (melipat linen). 6. Linen kotor infeksi (kantong plastik kuning) dan non infeksi dikirim ke laundry		
UNIT TERKAIT	1. Semua ruangan pengguna jasa CSSD 2. Laundry		