



| DEKONTAMINASI ALAT KESEHATAN | | | |
|---|---|--|-----------|
|  RSUD dr. Soedarso | No. Dokumen : | Revisi : | Halaman : |
| | 010/065/040.R.02/ AK-RSDS/2018 | 02 | 1/1 |
| Standar Prosedur Operasional | Tanggal Terbit 8 Januari 2018 |  Ditetapkan Direktur <u>Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH</u> Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001 | |
| Pengertian | Kegiatan menghilangkan/ membersihkan alat kesehatan dari kotoran/ noda sekaligus mikroorganisme yang melekat pada alat kesehatan | | |
| Tujuan | Agar konsentrasi desinfektan dan waktu perendaman dilakukan dengan tepat sehingga bahan dan alat kesehatan dekontaminasinya sempurna dan tidak mengalami kerusakan. | | |
| Kebijakan | SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso | | |
| Prosedur | Persiapan 1. Larutan Natrium Hipoklorit 0.5 % untuk dekontaminasi alat kesehatan dan untuk membersihkan tumpahan darah/ cairan tubuh 2. Gelas ukur, wadah plastik untuk menampung larutan Natrium Hipoklorit 3. Sarana cuci tangan 4. Alat Pelindung : sarung tangan rumah tangga, apron kedap air 5. Kacamata / pelindung wajah Prosedur : 1. Cuci tangan, kenakan sarung tangan rumah tangga, apron kedap air dan pelindung wajah bila perlu 2. Rendam alat kesehatan segera setelah dipakai dalam larutan Natrium Hipoklorit 0.5 %, selama 10 menit (bila lebih dapat memudahkan korosi alat) seluruh alat harus terendam larutan klorin 3. Segera bilas dengan air sampai bersih dan lanjutkan dengan pembersihan 4. Buka sarung tangan, masukkan dalam wadah sementara menunggu dekontaminasi sarung tangan dan proses selanjutnya 5. Cuci tangan | | |
| Unit Terkait | Semua Unit Pemberi Pelayanan | | |