


PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN ALAT			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman:
	010/065/066-R-02/ AK-RSDS /2018	02	1/1
Standar Operasional Prosedur	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat 1 NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu kegiatan dalam membersihkan dan mencuci alat-alat kesehatan dengan baik dan benar.		
Tujuan	Agar langkah-langkah pembersihan alat dapat dilakukan dengan sistematis sesuai dengan ketentuan pengendalian infeksi.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
Prosedur	Persiapan 1. Alat pelindung sama dengan dekontaminasi 2. Sikat yang lunak atau sikat gigi. 3. Air 4. Detergen 5. Wastafel Prosedur: 1. Kenakan sarung tangan, masker dan kaca mata pelindung ketika membersihkan instrument dan peralatan lainnya. 2. Keluarkan alat yang telah didekontaminasi dan dibilas air. 3. Cuci dengan air hangat dan detergen. 4. Sikat perlahan-lahan untuk menghilangkan bahan organik dari setiap permukaan termasuk gerigi dan lekukan. Penyikatan dilakukan dibawah permukaan air untuk mencegah cipratan. 5. Lepaskan bagian-bagian instrumen atau alat yang terbuat lebih dari satu bagian, yakinkan bahwa semua lekukan, geligi dan sambungan telah disikat, karena pada bagian ini bahan organik sering tersangkut / tertimbun. 6. Bilas sampai bersih dengan air hangat sampai tidak ada sisa-sisa detergen. 7. Keringkan diudara 8. Gunakan detergen baru setiap kali. 9. Bersihkan sikat dan wastafel. 10. Buka sarung tangan dan pelindung lainnya sebelum sterilisasi / desinfeksi. 11. Cuci tangan.		
Unit Terkait	Semua Unit Pemberi Pelayanan		