
 RSUD dr. Soedarso		PROSEDUR PRE CLEANING ALAT DAN INSTRUMEN DI RUANGAN DAN POLI		
		No. Dokumen :	Revisi :	Halaman:
		010/065/066. R.01/ Ak. RSDS /2018	01	1/1
Standar Operasional	Prosedur	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu tindakan yang dilakukan untuk membersihkan instrumen setelah dipakai			
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menghilangkan kotoran yang terlihat dan yang tidak terlihat 2. Untuk menghilangkan mikroorganisme berbahaya 3. Untuk meningkatkan efektifitas proses desinfeksi dan sterilisasi 			
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso			
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang melaksanakan pencucian melakukan cuci tangan sebelum bekerja 2. Mengenakan peralatan kerja (masker, sarung tangan, topi, sepatu boot, celemek, dan kaca mata) 3. Menyiapkan larutan pencuci/ perendaman instrumen yang terdiri dari campuran deterjen dan air kedalam ember bertutup 4. Masukkan instrumen kotor kedalam ember bertutup 5. Mengantar ember bertutup yang telah berisi cairan sabun dan instrumen ke CSSD segera setelah instrumen terkumpul 6. Melakukan serah terima dengan petugas CSSD 7. Melakukan pencatatan kedalam buku 8. Setelah semua proses selesai maka instrumen sudah bisa digunakan 			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawatan 2. Ruang Rawat Jalan 3. PPI 4. Instalasi Farmasi 5. ISPJ 			