
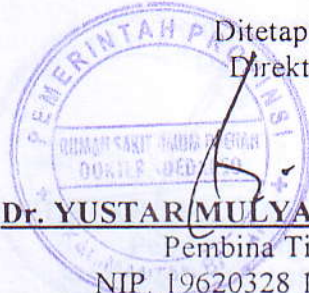


MEMBERSIHKAN TEMPAT TIDUR			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	010/065/045. R-02 / AK- RSDS /2018	02	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu kegiatan dalam membersihkan tempat tidur agar siap pakai.		
Tujuan	Mempersiapkan tempat tidur agar dapat digunakan oleh pasien selanjutnya.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
Prosedur	Persiapan 1. Larutan Chlorin 0,05% 2. Lap kering. 3. Sarung tangan rumah tangga. Prosedur: 1. Lap tempat tidur secara keseluruhan dengan lap yang telah dibasahi dengan larutan chlorin 0,05%. 2. Lap dengan lap kering. 3. Jemur kasur selama 1-2 jam. 4. Jika penjemuran tidak dapat dilakukan, maka kasur tersebut dilap dengan chlorin 0,05% biarkan hingga kering. 5. Prosedur ini dilakukan setiap pasien pulang sehingga siap untuk digunakan oleh pasien berikutnya. Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Jangan membersihkan roda dengan bahan pembersih khusus dan juga bahan cairan pembersih lainnya. • Jangan menempatkan bed diatas lantai yang masih basah mengandung bahan pembersih khusus atau bahan cairan pembersih lainnya. • Jangan menyemprotkan obat pembasmi serangga atau obat kimia lainnya langsung pada roda. 		
Unit Terkait	Semua Unit Pemberi Pelayanan		