



<b>STERILISASI FISIK DENGAN UAP PANAS KERING</b>			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	010/065/048-R-02/ AK-RSDS / 2018	02	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur  <b>Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH</b> Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu kegiatan sterilisasi terhadap alat-alat kesehatan dengan menggunakan uap panas kering.		
Tujuan	Untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme dari alat kesehatan termasuk endospora bakteri.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
Prosedur	Persiapan 1. Oven listrik. 2. Bahan pembungkus dari alumunium foil atau kain katun. 3. Nampan tahan panas. 4. Hanya peralatan yang terbuat dari kaca tahan panas dan logam yang dapat disentralisasi dengan cara ini. Prosedur: 1. Dekontaminasi, cuci dan keringkan semua alat kesehatan dan peralatan yang akan disentralisasi. 2. Bungkus alat kesehatan atau peralatan dengan alumunium foil atau 2 lapis katun / kain, atau taruh peralatan yang tidak dibungkus pada nampan atau taruh peralatan pada wadah logam. 3. Karena sterilisasi panas bekerja dengan meningkatkan suhu seluruh peralatan, maka tidak perlu untuk memisahkan / melepaskan komponen peralatan dan alat kesehatan atau peralatan dapat dimasukkan kedalam wadah tertutup.		
	<b>Suhu</b>	<b>Waktu</b>	
	170 <sup>0</sup> C (340 <sup>0</sup> F)	1 jam	
	160 <sup>0</sup> C (320 <sup>0</sup> F)	2 jam	
	150 <sup>0</sup> C (300 <sup>0</sup> F)	2.5 jam	
	140 <sup>0</sup> C (285 <sup>0</sup> F)	3 jam	
Unit Terkait	CSSD		